

ECG Dongle

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАРДИОКОМПЛЕКС

Кардиофлешка
Мобильное приложение
Облачный сервис



Профессиональный гид в мир вашего сердца

Получить полную информацию о приборе ECG Dongle и сервисе «КардиоОблако»

Купить прибор ECG Dongle и расходные материалы

Получить сервисную поддержку

www.cardio-cloud.ru

8 800 350-98-92

Ваш личный врач:

ID личного врача:



г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
+7 499 130-98-92

Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
+7 499 608-01-88

1

Загрузите мобильное приложение «ECG Dongle»



App Store


Google Play



2

Зафиксируйте электроды на теле


Четыре многоцветных электрода имеют клейкую поверхность и легко крепятся на теле самостоятельно в соответствии с цветовой индикацией.

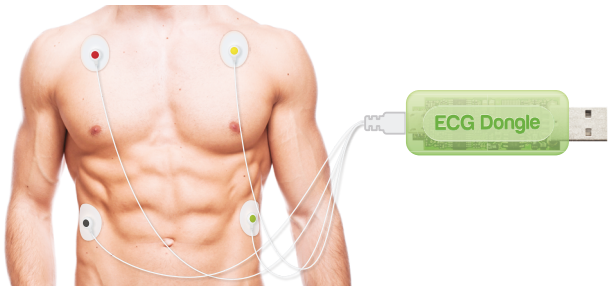

3

Подключите ECG Dongle к мобильному устройству


Устройство ECG Dongle позволяет просто и точно получить данные о работе сердца в любое время и в любом месте.

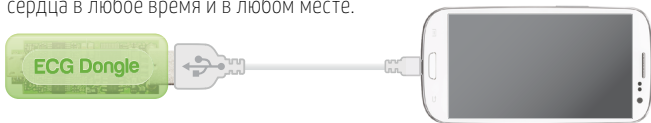

4

Проведите исследование

Следуя подсказкам приложения, сделайте запись от 30 секунд до 10 минут.

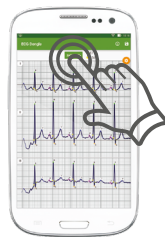

5

Отправьте полученные данные в «КардиоОблако» или сохраните результаты в формате pdf

С помощью сервиса «КардиоОблако» врач-кардиолог анализирует данные и выдает мнение о работе сердца и рекомендации.



КардиоОблако
www.cardio-cloud.ru